

101104 Reloj Parlante de Botón Extragrande

Inserte 3 pilas AAA (no incluidas) en el compartimento de las pilas en la parte inferior del reloj.

Para configurar el reloj, presione el botón Set redondo negro ubicado a la derecha de la puerta de la batería en la parte inferior del reloj para rotar a través de las funciones de configuración. Cada vez que presiona Set, avanza a la siguiente función. El orden de las funciones es: Configurar hora, Configurar minuto, Configurar año, Configurar mes, Configurar día, Configurar hora de alarma, Configurar minuto de alarma, Activar alarma.

Una vez en la función de configuración deseada, presione el botón azul para hablar para avanzar al número deseado (para la hora, fecha o activación/desactivación de la alarma). Si no se ha realizado ninguna acción después de unos segundos, escuchará un pitido y salir del modo de ajuste.

Para escuchar la hora, presione el botón azul una vez. Para escuchar la fecha, presione el botón azul nuevamente después de escuchar la hora. La fecha se pronuncia como fecha, mes, día "17 de marzo, martes" por ejemplo).

El volumen se puede configurar en Hi o Lo usando el interruptor en la parte inferior del reloj.

El sonido de la alarma es un timbre repetitivo, si presiona el botón azul mientras la alarma está sonando, se detendrá y anunciará la hora.